

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA PRIVIND CURATENIA PE TIPURI DE ECHIPAMENTE	Ediția 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
	Tip document: PROCEDURA GENERALA ; Cod document : PG. SPCIN. 17	

PROCEDURA PRIVIND CURATENIA PE TIPURI DE ECHIPAMENTE

PG. SPCIN.17



data : 29.09.2014

	Funcție	Nume și prenume	Semnătura	Data
Elaborat	RMC	Dr. Budea Adina	<i>Budea</i>	25.09.2014
Verificat	Director medical	Dr. Lupu Cristian	<i>Lupu</i>	29.09.2014

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA PRIVIND CURATENIA PE TIPURI DE ECHIPAMENTE			Ediția 1 2 3 4 Revizia 0 1 2 3 Exemplar nr.
	Tip document: PROCEDURA GENERALA ; Cod document : PG. SPCIN. 17			

LISTA DE DIFUZARE

Ex. nr.	Ediție/ revizie	Difuzare				Observații
		Departament	Nume și prenume	Semnătura	Data	
1	1/0	Manager	Ing. Mitrut Diana	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
2	1/0	Director medical	Dr. Lupu Cristian	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
3	1/0	Director financiar contabil	Ec.Pap Dalma	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
4	1/0	RMC	Dr.Budea Adina	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
5	1/0	Asistent coordonator	Drăgoș Viorica	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
6	1/0	Interne	Huszar Georgeta	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
7	1/0	Boli Cronice	Ciarnau Maria	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
8	1/0	Chirurgie-ortopedie	Chis Viorica	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
9	1/0	Urologie	Cernucan Elena	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
10	1/0	Pediatrie	Lohan Maria	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
11	1/0	Gastroenterologie	Marincas Nicoleta	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
12	1/0	Ingrijiri paliative	Pop Dorina	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
13	1/0	CPU	Lupu Mirela	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
14.	1/0	Obstetrica-Ginecologie	Meșve Noemia	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
15.	1/0	A.T.I.	Somcútean Emilia	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	
16.	1/0	Bloc operator	Pop Sabin	<i>[Signature]</i>	29.09.2014	

EVIDENȚA REVIZIILOR

Nr. Crt.	Ed./ Rev.	Pag.	Descriere conținut, motivul reviziei, localizare	Data, semnătura persoanei care a efectuat revizia
1	1/0		Editare inițială pentru implementare și conformare la cerințele referențialelor SR EN ISO 9001:2008	

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA PRIVIND CURATENIA PE TIPURI DE ECHIPAMENTE	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
	Tip document: PROCEDURA GENERALA ; Cod document : PG. SPCIN. 17	

1. SCOP

Stabileste modul de lucru privind curatenia echipamentelor din cadrul sectiilor/compartimentelor

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul tuturor secțiilor/compartimentelor spitalului

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:

- Ordinul MS nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor
- Manulalul de nursing
- Ordinul MS nr.261/2007, privind aprobarea Normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
- Ordinul MS nr.916/2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare

4. RESPONSABILITĂȚI:

Responsabil de proces = îngrijitoarea de curățenie , infirmiera , asistenta medicala
Echipa de proces = asistent sef secție + SPCIN

5. DESCRIEREA PROCEDURII:

Materiale si produse folosite:

- tinuta de protectie
- manusi nesterile
- detergent-dezinfectant
- dezinfectant de nivel înalt
- sterilizant chimic

Tehnica:

- dupa fiecare utilizare toate echipamentele si aparatura se sterg cu solutie de detergent-dezinfectant adecvat materialului din care este confectionat aparatul (pentru a evita deteriorarea acestora).
 - echipamentele care nu se deteriorează se vor imersa în soluție de detergent - dezinfectant
 - tipul de detergent , dezinfectat este ales în funcție de materialul din care este confectionat aparatul pentru a evita deteriorarea sa
 - tipul de dezinfectant și /sau sterilizant se alege în funcție de gradul de contaminare a aparturii
 - igienizarea se realizează pe baza programului de igienizare pentru fiecare echipament
- Verificarea respectarii procedurilor este organizata pe plan intern prin responsabilii din unitate.

Tipuri de echipamente:

Aparatura de ventilație

- dezinfectia aparatului propriu - zis prin ștergere sau pulverizare cu soluție dezinfectantă
- componentele care vin în contact cu pacientul :tubulatura pentru ventilație și filtrul antibacterian sunt materiale de unică folosință sterile.

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA PRIVIND CURATENIA PE TIPURI DE ECHIPAMENTE	Ediția 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: PROCEDURA GENERALA ; Cod document : PG. SPCIN. 17		

Aspiratorul pentru secreții

- recipientii pentru colectarea secrețiilor sunt dezinfectați cu soluție de detergent – dezinfectant de nivel înalt, clătire cu apă, imersare în soluție pentru sterilizare chimică, clătire cu apă sterile
- tubulatura aspiratorului se dezinfectează cu soluție de detergent – dezinfectant de nivel înalt prin imersare, în cuve special cu capac, se clătește cu apă sterile

Echipamentul pentru resuscitare (balon Ruben și mască facială)

- dezinfecție de grad înalt sau sterilizare chimică prin imersare în soluție de detergent – dezinfectant sau sterilizant chimic în cuve special cu capac
- clătire cu apă sterile

Aparatura de anestezie, laparoscop

- dezinfecția aparatului propriu-zis prin ștergere sau pulverizare cu soluție dezinfectantă
- componentele care vin în contact cu pacientul :tubulatura pentru ventilație și filtrul antibacterian sunt materiale de unică folosință sterile.

Electrocardiograf/ecograf

- dezinfecția aparatului propriu – zis prin ștergere cu o lavetă îmbibată cu soluție dezinfectantă
- electrozii care vin în contact cu pielea intactă a pacientului –dezinfecție de nivel mediu prin ștergere cu o lavetă îmbibată în soluție dezinfectantă
- sonda ecografului care vin în contact cu pielea intactă - dezinfecție de nivel mediu prin ștergere cu o lavetă îmbibată în soluție dezinfectantă

Stetoscop/manșeta de la tensiometru

- Dispozitiv noncritic care vine în contact cu pielea intactă a pacientului – dezinfecție de nivel mediu prin ștergere cu o lavetă îmbibată în soluție dezinfectantă

Termometre

- ștergere, pulverizare cu soluție dezinfectantă sau dezinfecție la nivel mediu prin imersare în soluție dezinfectantă

Atenție: Soluțiile dezinfectante se prepară zilnic

6. ANEXE

Program de igienizare pentru echipamente

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA PRIVIND CURATENIA PE TIPURI DE ECHIPAMENTE	Ediția <u> 1 </u> <u> 2 </u> <u> 3 </u> <u> 4 </u>
		Revizia <u> 0 </u> <u> 1 </u> <u> 2 </u> <u> 3 </u> Exemplar nr.
Tip document: PROCEDURA GENERALA ; Cod document : PG. SPCIN. 17		

Anexă
Program de igienizare pentru echipamente

Ziua / Ora	Echipament	Substanta de igiena utilizate	Igienizare realizata de / semnatura